



VetFreeze

**Kryobehandling med kontrolleret
og nem applikation!**



VetFreeze

Kryokirurgi med kontrolleret og nem applikation

VetFreeze giver enkel, sikker og effektiv kryokirurgisk behandling af en række forskellige vorter, almindelige hudlæsioner og særlige slimhindelæsioner. Indeholder gassen Norfluran (R134a), som er blevet brugt i astmainhalatorer i årtier og har vist sig at være sikker at bruge. Norfluran komprimeres til væske i en kompakt letvægtsbeholder og leveres med et sprøjtehoved, der sikrer kontrolleret og fokuseret anvendelse.

Enkel

- Klar til brug efter udpakning og kræver ingen yderligere forberedelse.
- Bærbar letvægtsbeholder, der let kan flyttes eller medbringes.
- Økonomisk i brug og intet spild pga. utæthed.
- 3 års holdbarhed fra fremstilling.
- Kræver ingen vedligeholdelse eller genopfyldning; når VetFreeze er tom, kan den smides ud med almindeligt husholdningsaffald.

Sikker

- Gassen udgør ingen risiko for disponering af skadelige stoffer og materialer og kræver således ikke personlige værnemidler eller ventilation i behandlingsrummet.
- Er let og sikker at opbevare samt transportere.*
- Leverer ensartet frysetemperatur, der med de anbefalede fryse-tø-cykluser skaber større kontrol med temperaturen, og dens effekt på det behandlede område, så overbehandling bedre kan undgås.

Effektiv

- Stabil behandlingstemperatur på -54 °C til -58 °C.
- Kontrolleret anvendelse og fokuseret påføring.

Behandling

En base-case for en almen VetFreeze-bruger vil have i omegnen af 1250 sekunder spray per dåse (ved øget erfaring kan man ramme 1900+ sekunder per dåse). Derfor, vil der ved 5x15 sekunder være omkring 17 behandlinger per dåse. Ved at bruge 5x15 sekunder viser foreløbige test, at hudlæsion forsvinder efter første behandling.**


* VetFreeze skal opbevares oprejst, uden for sollys og ved en temperatur på under 50 °C.

** Kryokirurgi kan medføre vabler, pigmentforandringer og pelstab omkring behandlingsstedet. Pigmentforandringer og pelstab er oftest midlertidigt, men kan i enkelte tilfælde være permanent.

Eksempel på behandling af vorte på hund med VetFreeze

1 behandling af 5 x 15 sek.

Vorten faldt af efter 3 dage – ingen bivirkninger observeret

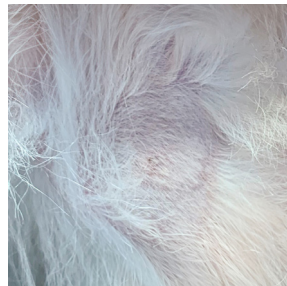

”

VetFreeze er blevet et uundværligt redskab i min praksis. Jeg oplever at udføre præcise og effektive behandlinger af hudlæsioner, og det bedste er, at VetFreeze er lige til at bruge. Mine patienter kommer sig hurtigt og uden nævneværdigt ubehag, og resultaterne har gang på gang levet op til forventningerne. Jeg føler mig tryk ved at bruge det og er glad for at kunne anbefale en mere skånsom behandling til ejer og patient. VetFreeze er særligt relevant til patienter, som enten jeg eller ejer ikke ønsker at bedøve.

Rikke Nyeman Grejsen - DVM, CSAVP Derm

Rikke Nyeman Grejsen er Dyrlæge, certificeret i dermatologi og medejer af Husum Dyreklinik.

Med mange års erfaring og en internationalt anerkendt certificering i dermatologi, er det Rikke der til dagligt behandler størstedelen af klinikkens hunde, katte og smådyr med hud- og ørelidelser.





Triolab AS
Vallensbækvej 35
2605 Brøndby
Danmark

Tlf. 43 96 00 12

triolab@triolab.dk
order@triolab.dk

Åbningstider:
Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-15:00

www.triolab.dk
webshop.triolab.dk

www.linkedin.com/company/triolab-a-s

Caroline Holse

Produktchef,
Veterinærdiagnostik

Mobil: +45 92 92 02 32
cahol@triolab.dk

